


Тренажер родов, продвинутая версия

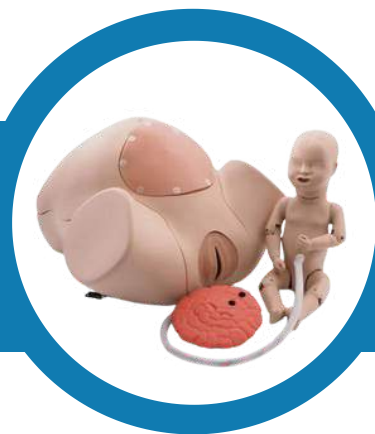

Артикулы: 1022879

Назначение

Акушерский симулятор предназначен для тренировки навыков ведения нормальных и осложненных родов, а также неотложных акушерских состояний. С помощью акушерской симуляции студенты учатся определять неправильные положения и предлежания плода, а также применять мануальные методы помощи при родах. Важно научиться правильно использовать мануальные приемы (например, приемы Леопольда, Ритгена и Пинара), чтобы в случае осложненных родов принимать необходимые меры.

Кроме того, студенты узнают, когда требуется проведение неотложных акушерских вмешательств, таких как кесарево сечение. С помощью данного симулятора студенты увидят, как мануальные приемы влияют на плод внутри матки, и смогут отработать соответствующие навыки и методы помощи при родах.

Особенности

- Плод в акушерском симуляторе обладает полной подвижностью в суставах, имеет открытый рот, голову, лопатку и анатомически правильные роднички
- Нижняя часть женского торса имеет натуральный размер, а также точные анатомические ориентиры, такие как таз, полость таза и позвоночник
- Симулятор родов оборудован ручной системой для управления поворотом плода и скоростью его рождения. Положение плода легко меняется во время симуляции, включая нисхождение, сгибание, разгибание, вращение внутрь и наружу, а также возвращение в исходное положение
- Симулятор удобно собирается и разбирается без использования инструментов, благодаря штыревым соединениям
- Нескользящее основание и рукоятки обеспечивают дополнительную поддержку на столе
- Акушерский симулятор можно крепить к столу или кровати при помощи ремня

Тренируемые навыки

- Нормальные вагинальные роды
- Нормальное рождение пуповины и плаценты
- Пальпация и определение положения плода и его предлежания
- Диагноз всех нормальных и ненормальных положений и предлежаний плода (лицевое, шейное или лобное предлежание) для демонстрации обычных и осложненных родов

- Внутриматочная манипуляция с плодом
- Плечевая дистоция (адаптивный родовой канал и кости таза), демонстрация и действия
- Ягодичные роды (включая полное, неполное и с вытянутыми ножками, а также простое ягодичное предлежание)
- Пальпация родничков плода
- Полное и неполное рождение плаценты
- Демонстрация предлежания плаценты: полное, частичное и краевое предлежание
- Выпадение пуповины
- Обвитие шеи пуповиной
- Кесарево сечение, с разрезом
- Искусственный разрыв плодных оболочек (ARM или AROM, амниотомия)
- Наложение зажима на пуповину и её перерезание
- Симуляция отсасывания слизи из ротовой и носовой полости младенца
- Прием Леопольда
- Прием Пинара
- Прием Морисо
- Пражский прием
- Прием Вудса
- Прием Рубина

Сравнение аналогов

Артикул	1000002	1005790	1022879	1013558	1019303
Плод	Плод с родничками и швами черепа	Плод мужского и женского пола с подвижными суставами	Плод мужского пола с подвижными суставами и родничками на голове	Плод с подвижными суставами	Плод с подвижными суставами
Пальпация родничков на голове	+	+	+	+	+

Артикул	1000002	1005790	1022879	1013558	1019303
Прослушиваемые тоны сердца роженицы и плода	—	—	—	—	+
Механизм родов	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную	Авто
Полное, чистое и неполное ягодичное предлежание плода	+	+	+	+	+
Роды путем кесарева сечения	—	+	+	+	+
Роды при полном и неполном предлежании плаценты	Только полное	Только полное	+	Только полное	Только полное
Искусственный разрыв плодных оболочек (AROM)	—	—	+	—	—
Внутриматочные манипуляции	—	+	+	+	+
Выпадение пуповины и предлежание плаценты	+	+	+	+	+
Ритгена	—	+	+	+	—
Леопольда	+	+	+	+	+
Пинарда и Прагьи (ягодичное предлежание)	—	+	+	+	+
Морисо-Смелли-Вейта (ягодичное предлежание)	—	—	+	+	+
Рубина и Вудса (дистоция плечиков)	—	—	+	+	+

Артикул	1000002	1005790	1022879	1013558	1019303
Эпизиотомия	—	+	При использовании дополнительно приобретаетаемого модуля 10 22212	+	—
Массаж дна матки	—	+	—	+	+
Рыхлая матка	—	—	—	+	+
Послеродовое кровотечение	—	—	При использовании дополнительно приобретаетаемого модуля 10 21567	—	+
Наложение зажима и перерезание пуповины	—	—	—	+	+

Комплект поставки

- Симулятор 3B Scientific® Birthing Simulator PRO
- Съёмная брюшная стенка с подкладкой, с вставкой для кесарева сечения
- Надувная вкладка в матку для приема Леопольда, включая стенку, которую можно разрезать для выполнения кесарева сечения
- Родовой канал (влагалищная часть шейки матки, шейка и влагалище)
- Крепежный ремень
- Смазка
- Амниотическая жидкость и 100 вставок
- Сборочный комплект
- Полностью гибкая в суставах модель плода (49 см весом в 1 кг)
- Пуповина
- Плацента

Материал

Мягкий винил и силиконовая резина

Вес, кг


7.35



Дополнительные фотографии



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

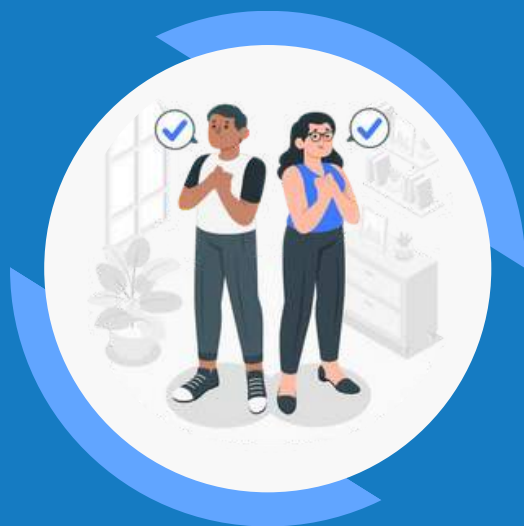

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru