

## Усовершенствованный тренажер- модель головы «Airway Larry», на стойке



**Артикулы: 1019249**

### Назначение

Усовершенствованный фантом головы для освоения навыков восстановления проходимости дыхательных путей «Airway Larry» обладает всеми функциями стандартных моделей, а также дает возможность имитировать отек языка и ларингоспазм. Теперь ваши студенты могут увидеть дополнительные сложности, с которыми можно столкнуться в реальной жизни.

Тренажер для освоения навыков восстановления проходимости дыхательных путей моделирует пациента без анестезии для отработки методов интубации, вентиляции и аспирации. Имеет реалистичные анатомические структуры и ориентиры, а также позволяет отрабатывать интубацию различными способами.

### Анатомические ориентиры

- зубы
- язык
- рото- и носоглотка
- гортань
- надгортанник
- черпаловидные хрящи
- ложные связки
- истинные голосовые связки
- трахея
- легкие
- пищевод и желудок

### Способы отработки интубации

- через рот
- через нос
- под пальцевым контролем
- с введением трубок E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube® и KING System.

Надавливание на перстневидный хрящ изменяет положение трахеи и закрывает пищевод, позволяя **реалистично отработать прием Селлика**. Благодаря легкому **наклону головы** кпереди, а также наличию «отекшего» языка и голосовых связок, усовершенствованный медицинский манекен-тренажер «Airway Larry» является **превосходным пособием как на начальном этапе обучения, так и для отработки навыков повышенной сложности**.

Также можно отработать и оценить методики аспирации и правильного раздувания манжеты. Имеет прочные, неразборные, разветвленные легкие. Голова прочно закреплена на подставке.

| Модели                         | <a href="#">арт. 1012740</a> | <a href="#">арт. 1020961</a>    | <a href="#">арт. 1005633</a>       | <a href="#">арт. 1005780</a>                                                         | <a href="#">арт. 1017871</a>                                       | <a href="#">арт. 1019249</a>                                     | <a href="#">арт. 1021583</a>                                           | <a href="#">арт. 1019928</a>                              | <a href="#">арт. 1018851</a>                                                    | <a href="#">арт. 1005774</a>                                                         |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова/ туловище               | Мужская голова               | Мужская голова на плоской опоре | Мужская голова на плоской опоре    | Мужская голова на плоской опоре                                                      | Туловище с женской головой                                         | Мужская голова на плоской опоре                                  | Мужская голова                                                         | Мужское туловище                                          | Мужская голова на плоской опоре                                                 | Мужская голова на плоской опоре                                                      |
| Идеально для                   | Вводных курсов               | Вводных и углубленных курсов    | Тестирования и практики Combitube® | Обучения спасению и углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей | Обучения приемам в случае труднопроходимых дыхательных путей и СЛР | Углубленного обучения обеспечению проходимости дыхательных путей | Ларингоскопии с вспомогательной аспирацией и очистки дыхательных путей | Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей и СЛР | Крикотиротомии и специальных методик обеспечения проходимости дыхательных путей | Обучения обеспечению проходимости дыхательных путей при спасении и изучения анатомии |
| Пальцевая слепая интубация     | +                            | +                               | +                                  | —                                                                                    | +                                                                  | +                                                                | +                                                                      | +                                                         | —                                                                               | —                                                                                    |
| Ларингоспазм и отек языка      | —                            | +                               | —                                  | —                                                                                    | —                                                                  | +                                                                | —                                                                      | —                                                         | +                                                                               | +                                                                                    |
| Поднять стенки брюшной полости | —                            | +                               | —                                  | —                                                                                    | —                                                                  | —                                                                | —                                                                      | —                                                         | +                                                                               | +                                                                                    |
| Аспирация                      | +                            | +                               | +                                  | +                                                                                    | +                                                                  | +                                                                | +                                                                      | +                                                         | —                                                                               | —                                                                                    |
| Выдвижение нижней челюсти      | —                            | —                               | +                                  | —                                                                                    | +                                                                  | —                                                                | —                                                                      | —                                                         | —                                                                               | —                                                                                    |

| Модели                                                                  | <a href="#">арт. 1012740</a>                             | <a href="#">арт. 1020961</a>                             | <a href="#">арт. 1005633</a>                             | <a href="#">арт. 1005780</a>         | <a href="#">арт. 1017871</a>         | <a href="#">арт. 1019249</a>         | <a href="#">арт. 1021583</a>                                                             | <a href="#">арт. 1019928</a>         | <a href="#">арт. 1018851</a>                                           | <a href="#">арт. 1005774</a>                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Определяемый пальпацией пульс сонной артерии                            | +                                                        | —                                                        | —                                                        | —                                    | +                                    | +                                    | +                                                                                        | +                                    | —                                                                      | —                                                                          |
| Введение E.T., E.O.A., P.T.L, L.M.A., Combitube® и ларингеальной трубки | +                                                        | +                                                        | +                                                        | Только LMA и Combitube®              | +                                    | +                                    | +                                                                                        | +                                    | —                                                                      | —                                                                          |
| Дополнительные функции                                                  | Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis® | Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis® | Может присоединяться к любому манекену взрослого CRiSis® | Прочная конструкция и двойное легкое | Прочная конструкция и двойное легкое | Прочная конструкция и двойное легкое | Жесткий аспирационный катетер отводит нижнюю челюсть и язык, позволяя ввести ларингоскоп | Прочная конструкция и двойное легкое | Реалистичная кожа, устойчивая к повреждениям при агрессивной интубации | Изучение легочного круга кровообращения и полостей ротоглотки и/носоглотки |
| Поднятие стенки брюшной полости                                         | —                                                        | +                                                        | —                                                        | —                                    | —                                    | —                                    | —                                                                                        | —                                    | +                                                                      | +                                                                          |
| Аспирация                                                               | +                                                        | +                                                        | +                                                        | +                                    | +                                    | +                                    | +                                                                                        | +                                    | —                                                                      | —                                                                          |
| Выдвижение нижней челюсти                                               | —                                                        | —                                                        | +                                                        | —                                    | +                                    | —                                    | —                                                                                        | —                                    | —                                                                      | —                                                                          |

|                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определяемый пальпацией пульс сонной артерии | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Чтобы узнать актуальную стоимость  
или сделать заказ, позвоните нам по телефону  
**8 800 444 12 55**  
или отправьте письмо на почту  
**zakaz@feba.ru**



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ  
О НАШИХ ТОВАРАХ  
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ  
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru